

Imprevistos	Provável causa	Solução
Travamento, Lentidão na focalização (Slow Motion), Interferências na imagem.	Você pode estar usando uma Extensão USB.	Conectar a Intracam utilizando apenas o cabo USB do fabricante.
Travamento do Computador ao conectar a câmera.	Seu antivírus pode estar bloqueando o funcionamento da câmera; Erros na execução do AWBOOK.	Entre em contato com o suporte do seu antivírus e peça para configurar o uso de dispositivos USB. Veja telefones úteis abaixo.
Ao ligar a câmera, em vez de aparecer a imagem da câmera, aparece a imagem da webcam ou uma tela branca.	Seu computador dá prioridade para a webcam, e não à IntraCam.	Entre em contato com o suporte técnico do seu computador pra desativar a webcam, no gerenciador de dispositivos. Veja telefones úteis abaixo.
Ao tocar o botão touch, não captura ou salva a imagem.	Seu computador pode não estar aterrado.	É necessário verificar o aterramento da sua instalação elétrica, com um eletricista.
Tela Branca	Seu computador pode ter uma placa de TV ou Software de captura (Cyber link Youcam, por exemplo)	Procure o suporte técnico do seu computador e peça para desinstalar a placa ou o software que está entrando em conflito com a câmera.

#### Suporte Técnico Computador:

Lenovo – (11) 4090-1234  
 Positivo – 4002 6440/ 0800 644 7500  
 Samsung – 4004-0000  
 Asus – 3003-0398/ 0800 288 8888  
 Dell – 0800 970 3355  
 Compaq - www.compaq.com.br/suporte-tecnico  
 Apple – 0800 761 0880

#### Suporte Técnico Antivírus:

Kaspersky - (11) 3958-3843  
 Macfee - (11) 3711-8200  
 Avira - 4003-9960  
 Avast - help.avast.com

# GUIA RÁPIDO

## AWBOOK IntraCam H5

**ACTIVEWARE**  
EVOLUÇÃO CONSTANTE

Rua Melo Palheta, 189 - Perdizes  
 São Paulo - SP - 05002-030  
 Telefone : (11) 3873-7727  
 suporte@actiware.com.br  
 www.actiware.com.br



GR.H5.V03 09/16

## ATENÇÃO:

A IntraCam foi programada para ascender um led vermelho quando a alimentação fornecida pelo seu computador estiver abaixo da necessária (4,45V).

Neste caso, a sua câmera pode não funcionar, ou funcionar com dificuldades. Se isso acontecer, observe se está usando o cabo USB original ou tente ligar a câmera em outra porta USB;

## O que você precisa saber ANTES DE LIGAR SUA INTRACAM

Para visualizar e salvar as imagens, você precisa de um Software de captura. Para isso, a ActiveWare disponibiliza o AWBOOK, que você pode usar nas seguintes versões:

### (AWBOOK off-line)

Plano Gratuito

Aplicativo para computador  
Salva as fotos no seu computador.

#### COMO USAR?

Baixe o Software no site [awbook.com.br](http://awbook.com.br) em "Download" e instale no seu computador.

**Atenção!** Apenas para Windows 7,8,10.

### (AWBOOK Online)

Plano de R\$15,00/mês

Visualiza as fotos no navegador, salva nas nuvens, com backup e espaço ilimitado

#### COMO USAR?

Acesse o site [awbook.com.br](http://awbook.com.br) e assine o plano "Básico" Compatível com navegadores: Google Chrome e Firefox.

**Atenção!** Apenas para Windows 7,8,10.

### (Sistema Android)

Plano de R\$25,00/mês

Uso livre do aplicativo no navegador. Visualize e salve as fotos no seu celular ou tablet. Sincronize as fotos para as nuvens com backup e espaço ilimitado

#### COMO USAR?

Acesse o site [awbook.com.br](http://awbook.com.br) e assine o plano "Android" - Baixe o APP no seu celular ou tablet com sistema Android

**Atenção!** Antes de assinar o plano, consulte a compatibilidade com o seu celular/tablet.

## INSTALAÇÃO E USO

# AWBOOK



**1** Acesse o site [www.awbook.com.br](http://www.awbook.com.br) e faça o download do software Awbook, em seguida, instale-o em seu computador.

**2** Conecte uma das extremidades do cabo da IntraCam na porta traseira azul USB 3.0 de seu computador e a outra extremidade em sua câmera, assim que o led indicador de alimentação azul acender aguarde o driver ser instalado automaticamente.



**2** Conecte uma das extremidades do cabo da IntraCam na porta lateral azul USB 3.0 de seu notebook e a outra extremidade em sua câmera, assim que o led indicador de alimentação azul acender aguarde o driver ser instalado automaticamente.

## CAPTURANDO IMAGEM

**IMPORTANTE:** Se você utiliza o software na versão online, pular para página 3.

### SOFTWARE OFFLINE

• Após a instalação do Software, clique no ícone do Awbook na área de trabalho, assim que o programa iniciar feche a janela de login e senha, clique no usuário particular e cadastre o paciente.



• Utilize o filme plástico PVC para evitar a contaminação cruzada entre os pacientes.


• Com a sua IntraCam conectada, para fazer a captura de imagens clique no botão capturar, conforme imagem abaixo:



• Toque em um dos botões touch da IntraCam para ligar o equipamento. Observe o led azul indicando o modo "automático" e toque mais uma vez no botão para fazer a captura da foto.



• Logo após a captura de todas as imagens do paciente, feche a tela e automaticamente todos os dados e imagens são salvos, conforme imagem abaixo:

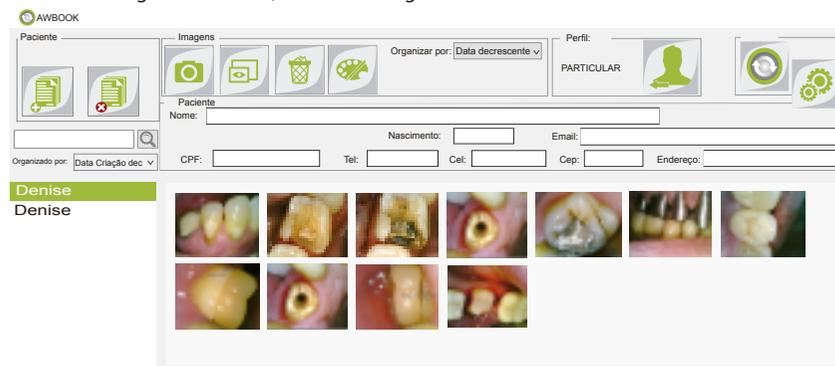


**ATENÇÃO!** Para que todas as fotos e dados sejam armazenados na nuvem é preciso adquirir o Awbook Online.

• Para desligar a câmera, feche todas as telas do software de captura.

## SOFTWARE ONLINE

• Acesse o site [www.awbook.com.br](http://www.awbook.com.br) e entre com seu login e senha de acordo com as informações enviadas para o e-mail cadastrado na compra. Quando o acesso for liberado e o software iniciar, selecione o perfil Particular conforme a imagem abaixo:

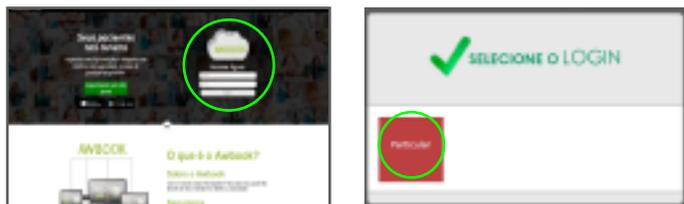

• Para cadastrar um novo paciente clique em "novo paciente" e preencha os campos em branco. Os campos "NOME" e "CPF" são obrigatórios. Para finalizar, clique em "cadastrar" conforme imagem abaixo:



• Após cadastrar o paciente, com a IntraCam conectada na porta USB 3.0 de seu computador, toque em um dos botões touch para ligar o equipamento. Observe o led azul indicando o modo "automático".



• Com sua IntraCam ligada no modo "automático" clique em "fotos" e em seguida "capturar", assim que abrir uma nova tela, toque mais uma vez no botão touch para fazer a captura da foto, conforme imagem abaixo:



• Para finalizar e desligar a câmera clique no botão "x" no lado esquerdo da tela, e todas as fotos serão salvas automaticamente no cadastro do paciente.

## CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA

### Ajuste do Branco (White Balance):

Para alterar a tonalidade do branco e ajustá-la ao ambiente, toque simultaneamente os dois botões touch e continue pressionando-os até passar por todas as outras funções. O ajuste inicia quando a câmera emite um bip contínuo. Ainda pressionando os botões, aponte a câmera para uma superfície branca e então solte-os. O ajuste é feito automaticamente.

## MODO DE CAPTURA



**Modo Automático:** Led Azul. Toque em um dos botões touch, a câmera ajusta o foco, captura e armazena a imagem automaticamente.



**Modo Macro:** Led Branco Piscante. Para capturar imagens com zoom de 50x, posicione a câmera a uma distância de 8mm do alvo desejado, mantenha a posição fixa e, quando a imagem estiver focada, toque em um dos botões para capturar e armazenar sua foto.



**Modo Semiautomático:** Led Magenta. Toque em um dos botões e a câmera buscará o foco. Aguarde a focalização e, para capturar e armazenar a imagem, toque novamente e mantenha pressionado por 2 segundos um dos botões

Para alterar as funções: Toque simultaneamente nos botões touch e observe a mudança de cor do led indicativo acompanhado de um bip. Ao encontrar a função desejada, solte os botões.

 Todos os ajustes da sua IntraCam, devem ser realizados com a tela de captura aberta

## ILUMINAÇÃO



A IntraCam possui quatro níveis de iluminação. Para alterá-los, toque e solte rapidamente os dois botões touch simultaneamente.

**Flash:** Dois leds brancos iluminam a área para obtenção de imagens de qualidade.

**UV:** Dois leds Ultra Violeta provocam a fluorescência, destacando algumas resinas restauradoras facilitando sua remoção.

**Flash e UV:** Captura duas imagens sequenciais: a primeira com o flash e a segunda com ultravioleta.

**Desligado:** Sem nenhum led aceso.



### Cuidado: Emite Radiação Ultravioleta

O led UV irradia luz Ultra Violeta Intensa. Nunca olhe diretamente para a luz do led UV durante a operação da IntraCam. Olhar para a luz UV pode ser prejudicial ao corpo humano, especialmente para os olhos e para a pele, mesmo por um breve período. Se for necessário olhar para o led, utilize óculos com filtro UV para evitar os danos causados pela luz.

## LIMPEZA

Utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 70% (álcool etílico hidratado 70 IMPM) para passar por todo gabinete da câmera.



Não autoclavar.



Nunca utilize substâncias químicas como: ácidos, mercúrio, líquidos acrílicos, amálgamas, etc.

Leia ou baixe o manual completo no site [www.activeware.com.br](http://www.activeware.com.br)  
"Downloads" clique em "Manual. PDF"