

Manual do Proprietário

Mochos



Accese la versión en Español deste manual
aqui: www.dabi.com.br/esp/prod_manual/mocho

DABI ATLANTE
A marca do Brasil

Ergorelax

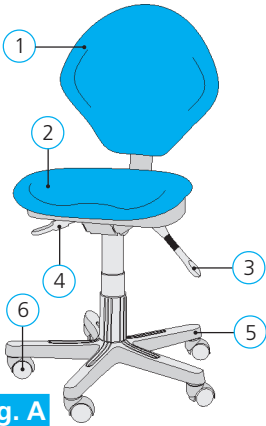


fig. A

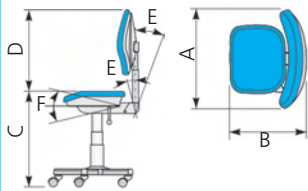


fig. B

Ergorelax*



fig. C

premium

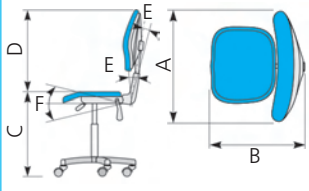


fig. D

Ergorelax básico

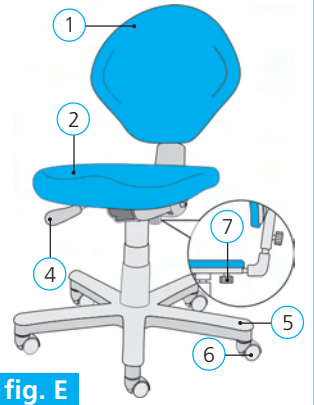


fig. E

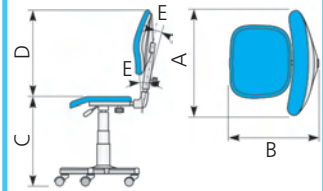


fig. F

Ergofix

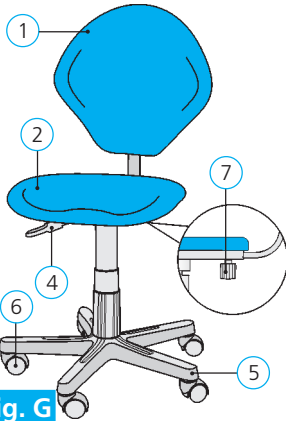


fig. G

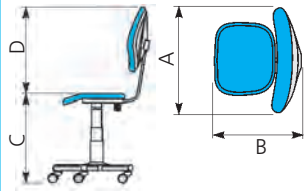


fig. H

Ergofix básico

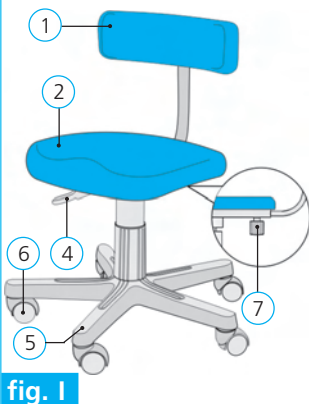


fig. I

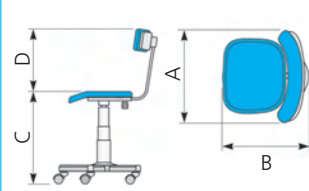


fig. J

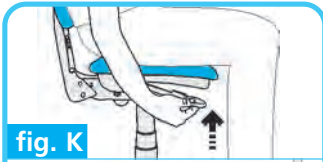


fig. K



fig. L



fig. M

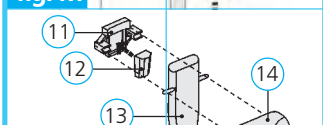


fig. N

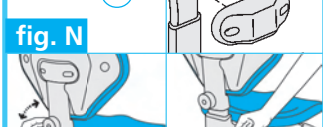


fig. O



fig. P

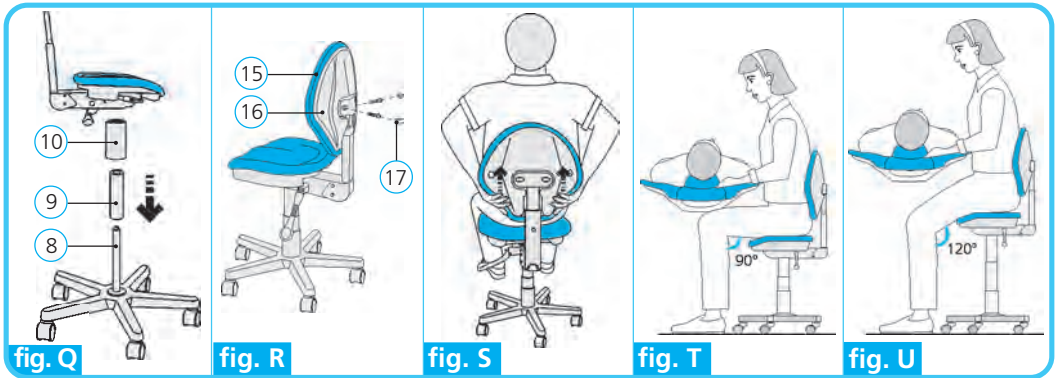


fig. Q

fig. R

fig. S

fig. T

fig. U

Conteúdo

Apresentação	01
Legenda	01
Instalação	01
Procedimentos adicionais antes da utilização/reutilização do equipamento ..	01
Operação	01
Posicionamento no Mocho	02
Limpeza	02
Manutenção	02
Recomendações e cuidados	02
Precauções em caso de inutilização do equipamento	02
Condições de transporte e armazenamento ..	02
Após a instalação	02
Preparação antes da entrega	03
Rede de Serviços Autorizada Dabi Atlante ..	03
Recomendações finais	03
Classificação e tipo	03
Garantia do equipamento	03
Características e dimensões	03

Apresentação

Prezado Cliente,
Seja bem vindo!

Estamos orgulhosos de sua opção por nosso produto. O conhecimento dos **Mochos** potencializa seu desempenho e aumenta a sua durabilidade e benefícios. Portanto, antes de utilizá-los leia atentamente este Manual.

Importante

Todas as informações, ilustrações e especificações deste Manual foram baseadas em dados existentes na época de sua publicação. Reservamos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto, quanto neste Manual, sem prévio aviso.

Legenda

- 1 Encosto (fig. A, C, E, G e I)
- 2 Assento (fig. A, C, E, G e I).
- 3 Alavanca de regulagem da inclinação do encosto (fig. A e C).

- 4 Alavanca de regulagem da altura do assento (fig. A, C, E, G e I).
- 5 Base (fig. A, C, E, G e I).
- 6 Rodízios (fig. A, C, E, G e I).
- 7 Trava de regulagem da distância do encosto em relação ao assento (fig. E, G e I).
- 8 Pedestal (fig. Q)
- 9 Coluna a gás (fig. Q)
- 10 Capa telescópica (fig. Q)
- 11 Apoio do encosto (fig. N)
- 12 Borracha (fig. N)
- 13 Haste do encosto (fig. N)
- 14 Capa de acabamento (fig. N)
- 15 Estofamento (fig. R)
- 16 Capa (fig. R)
- 17 Tampão (fig. R)

Instalação

Recomenda-se um técnico autorizado Dabi Atlante, para instalação.

Encaixe a coluna a gás no pedestal e pressione o conjunto. Coloque a capa telescópica na coluna a gás. Encaixe a capa telescópica no pedestal. Encaixe o mecanismo do assento na coluna a gás e pressione o conjunto (fig. Q).

Coloque a haste do encosto entre a capa de acabamento e o apoio do encosto com a borracha (fig. N).

Fixe o estofamento e capa do encosto na haste do encosto. Encaixe os tampões na capa de acabamento (fig. R).

Procedimentos antes da utilização/reutilização do equipamento

Antes de sua utilização/reutilização, siga as instruções de operação e limpeza contidas neste Manual.

Operação

Regulagem da altura do assento

Sentado no mocho, puxe para cima a alavanca de regulagem da altura do assento (fig. K).

Alivie o peso sobre o assento para subir ou mantenha o peso para descer.

Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Regulagem da distância do encosto (Ergofix, Ergofix básico e Ergorelax básico)

Gire a trava da posição do encosto (fig. L) e este ficará livre para ser movimentado.

Inclinação do encosto (Ergorelax e Ergorelax*)

Sentado no mocho, puxe para cima a alavanca da regulagem de inclinação do encosto (fig. M).

Pressione o encosto com as costas para incliná-lo para trás ou alivie a pressão das costas contra o encosto para incliná-lo para frente.

Ao atingir a posição desejada, empurre a alavanca para a posição original.

Inclinação do encosto (Ergorelax Básico)

Gire a trava da posição do encosto (fig. P) e este ficará livre para ser movimentado.

Regulagem da altura do encosto (Ergorelax e Ergorelax*)

Puxe o encosto para cima para colocá-lo na posição desejada (fig. S). Ao soltar, o encosto fica travado automaticamente.

Para colocar na altura mínima, puxe o encosto para cima até o fim para destravar o mecanismo e, depois, direcione-o para baixo.

Regulagem da altura do encosto (Ergorelax básico)

Gire a trava da posição do encosto (fig. O) e este ficará livre para ser movimentado.

Posicionamento no Mocho

O CD pode ajustar a altura do mocho de maneira a obter um ângulo que varie de 90° a 120°, conforme preferir (fig. T ou U).

⚠ Convém lembrar que quanto maior for o ângulo acima de 90°, maior será o apoio sobre as pernas e menor o apoio sobre a região coccígea, o que produz maior compressão da circulação venosa e conseqüente aparecimento de varizes.

É indispensável pé apoiado no chão, coluna ereta e apoiada no encosto do mocho.

Limpeza

Limpe a superfície do equipamento com um pano limpo e macio umedecido com Aplic Odonto da Dabi Atlante ou produto com propriedades químicas similares.

⚠ A utilização de outros produtos químicos não é recomendada, pois pode danificar o equipamento.

Manutenção

Manutenção preventiva

Para reduzir a probabilidade de falha e aumentar a vida útil de seu equipamento, procure uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante e faça um plano regular de manutenção preventiva.

Manutenção corretiva

Caso o equipamento apresente alguma anormalidade,

entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante.

⚠ Não abra o equipamento e/ou tente consertá-lo. Isto pode agravar o problema ou até gerar outras falhas.

Esquema de circuito, listas de peças, componentes e outros

Caso seja necessário, solicite à Dabi Atlante esquemas elétricos e/ou listas de peças, componentes ou outras informações, os quais serão fornecidos mediante acordo.

Recomendações e Cuidados

Não deixar acumular produtos de limpeza em qualquer parte do mocho.

Recomenda-se o uso de filme de pvc em todo o estofamento, pois roupas de couro ou tecidos que soltam cor podem provocar manchas.

Precauções em caso de inutilização do equipamento

Ao ser inutilizado, o equipamento deve ser descartado em local apropriado (de acordo com a legislação local vigente), evitando a contaminação ambiental ou o uso inadequado do mesmo.

Condições de transporte e armazenamento

O equipamento deve ser transportado e armazenado:

- Com cuidado para evitar quedas e impactos;
- Com o lado da seta para cima;
- Observando-se os limites de empilhamento máximo indicado na embalagem;
- Protegido contra umidade, chuvas, respingos de água e solo molhado.

Condições ambientais de transporte/armazenamento

Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento	0°C a + 55°C
Faixa de umidade relativa de transporte ou armazenamento	0% a 90% (não condensante)
Faixa de pressão atmosférica	500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg)

Após a instalação

Manter o equipamento em local protegido de chuva e sol.

Condições ambientais de operação

Faixa de temperatura ambiente de funcionamento	+10°C a +35°C
Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Dabi Atlante	+21°C a + 26°C
Faixa de umidade relativa de funcionamento	30% a 75% (não condensante)
Faixa de pressão atmosférica	700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg)

Condições ambientais de acondicionamento (entre as operações)

Faixa de temperatura ambiente de acondicionamento	+5°C a +45°C
Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Dabi Atlante	+15°C a +30°C
Faixa de umidade relativa de acondicionamento	30% a 75% (não condensante)
Faixa de pressão atmosférica	700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg)

Preparação antes da entrega

Este equipamento foi revisado e aprovado de acordo com o Programa de Inspeção e Controle de Qualidade Dabi Atlante para lhe proporcionar o melhor desempenho.

Rede de Serviços Autorizada Dabi Atlante

A instalação e todos os serviços de manutenção nos equipamentos Dabi Atlante deverão ser feitos por meio de uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante, caso contrário o equipamento terá sua garantia comprometida.

Utilize o encarte anexo ou o site www.dabi.com.br para encontrar a Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante mais próxima.

Recomendações finais

Para garantir a vida útil de seu equipamento, reponha somente peças originais Dabi Atlante, as quais possuem a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pela empresa.

Utilize somente os serviços de uma Assistência Técnica Dabi Atlante, pois possui técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu equipamento.

Classificação e tipo

- Conforme a Diretiva 93/42: Classe I.

Garantia do equipamento

Os "Termos de Garantia" constam no verso do Certificado anexo ao produto. Ficam vetadas quaisquer alterações ou concessões de garantia, condições e/ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia documentada pela Dabi Atlante.

Características e Dimensões

Item	Ergofix básico	Ergofix	Ergorelax básico	Ergorelax	Ergorelax*
A - Largura	390mm	410mm	410mm	410mm	410mm
B - Comprimento	480mm	480mm	480mm	510mm	510mm
C - Altura do assento	Mín. 440mm Máx. 540mm	Mín. 440mm Máx. 540mm	Mín. 440mm Máx. 540mm	Mín. 440mm Máx. 540mm	Mín. 450mm Máx. 585mm
D - Altura do encosto com relação ao assento	250mm	380mm	Mín. 430mm Máx. 470mm	Mín. 450mm Máx. 550mm	Mín. 430mm Máx. 520mm
E - Inclinação do encosto	-	-	Para frente 10° Para trás 8°	Para frente 5° Para trás 20°	Para frente 8° Para trás 26°
F - Inclinação do assento	-	-	-	Para cima 3° Para baixo 0°	Para cima 8° Para baixo 1°
Capacidade de carga	135,0 kg	135,0 kg	135,0 kg	135,0 kg	135,0 kg
Sistema de elevação	Pistão a gás	Pistão a gás	Pistão a gás	Pistão a gás	Pistão a gás

Responsável Técnico: Leonel Issa Halak - CREA-SP 0600256918

Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde

Representante legal CE:

MPC International S.A - 26, Boulevard Royal - L-2449 - Luxembourg - Fone: +49 431-7028 219 - Fax: +49 431-7028 202



www.dabi.com.br
Tel.: (16) 3512 1212