

Português

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

LAVADORA ULTRASSÔNICA
BIO FREE 6L



APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

Nome Técnico: Lavadora Ultrassônica.

Nome Comercial: Lavadora Ultrassônica Bio Free 6L

Modelo: Bio Free 6L

Marca: D700

Fornecedor / Fabricante:

C.N.P.J. 48.015.119/0001-64 - Insc. Est. 582.329.957.115

Rod. Abrão Assed , Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500

Ribeirão Preto - S.P. - Brasil

Fone +55 (16) 2102-5000 - Fax +55 (16) 2102-5001

Responsável Técnico: Ricardo J. Ravaneli

CREA-SP: 5060714523

"Declarado isento de registro pelo ministério da saúde"

ATENÇÃO

Para maior segurança:

Leia e entenda todas as instruções contidas nestas instruções de uso antes de instalar ou operar este equipamento.

Nota: Estas instruções de uso devem ser lidas por todos os operadores deste equipamento.

ÍNDICE

02 APRESENTAÇÃO DO MANUAL

04 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

04 Indicação do equipamento

05 Princípios e fundamentos aplicados para o funcionamento do produto

05 Descrição do Equipamento

06 MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

07 APLICAÇÕES

09 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

08 Características gerais

10 Simbologias da embalagem

10 Simbologias do produto

12 OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

19 PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

20 Recomendações para a conservação do equipamento

20 Condições de transporte, armazenamento e operação

20 Sensibilidade a condições ambientais previsíveis em situações normais de uso

20 Precauções e advertências “durante a instalação” do equipamento

21 Precauções e advertências “durante a utilização” do equipamento

21 Precauções e advertências “após” a utilização do equipamento

21 Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento

21 Precauções em caso de alteração no funcionamento do equipamento

22 Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou incomuns, relacionados com a desativação e abandono do equipamento

22 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

22 Procedimentos adicionais para reutilização

22 Limpeza e Desinfecção

23 Manutenção Preventiva

23 Manutenção Corretiva

24 IMPREVISTOS - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

24 GARANTIA DO EQUIPAMENTO

24 CONSIDERAÇÕES FINAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Prezado Cliente

Parabéns pela excelente escolha. Ao comprar equipamentos com a qualidade "D700", pode ter certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatível com os melhores do mundo em sua classe. Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Técnico: Lavadora Ultrassônica

Nome Comercial: Lavadora Ultrassônica Bio Free 6L

Modelo: Bio Free 6L

Marca: D700



Indicação do equipamento

Limpeza de acessórios e instrumentais médicos, laboratoriais e odontológicos "remoção de sangue e pequenas partículas sobre os instrumentos antes da desinfecção". Devendo ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada, observando as instruções contidas neste manual.

É obrigação do usuário usar somente o equipamento em perfeitas condições e proteger a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.



Este equipamento realiza a limpeza de instrumentais e não processos de desinfecção e/ou esterilização.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Princípios e fundamentos aplicados para o funcionamento do produto

A limpeza ocorre por meio de cavitação, atingindo uniformemente todo o material a ser limpo, inclusive em locais de difícil acesso.

Esta ocorre através de um gerador ultrassônico de vibração, onde um campo de prova é submetido à uma vibração em alta frequência quando imerso em solução líquida.

A vibração gera uma pressão negativa ocasionando o surgimento de micro bolhas no líquido e uma pressão positiva propiciando o colapso destas bolhas na superfície do corpo de prova, formando micro jatos que são responsáveis pelo efeito de erosão e limpeza.

Descrição do equipamento

Equipamento de ultrassom para limpeza de acessórios e instrumentais médicos e odontológicos composto de:

Corpo injetado em ABS;

Painel de comando com display digital;

Tampa visualizadora removível e transparente;

Tanque constituído de cuba em inox e cesto plástico;


Gerador ultrassônico de vibração;

Cabo de força.

MÓDULOS, ACESSÓRIOS, OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO



O conteúdo desta página é de caráter informativo, podendo o equipamento se apresentar diferente do ilustrado. Portanto, ao adquirir o produto verifique a compatibilidade técnica entre o equipamento, acoplamento e acessórios.

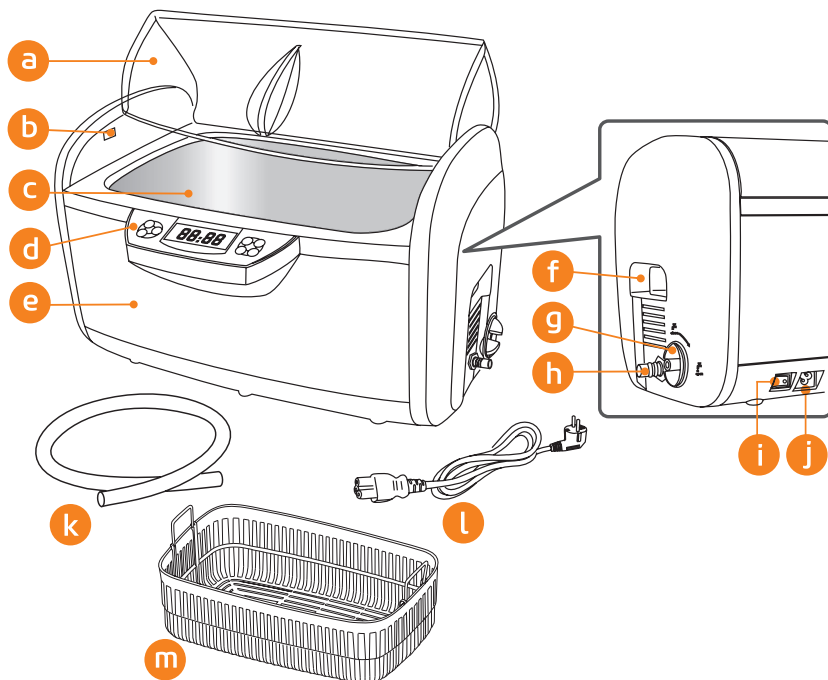

A - Tampa
 B - Luzes LED
 C - Cuba de inox
 D - Painel de controle
 E - Corpo da lavadora
 F - Alças
 G - Válvula de drenagem

H - Tubo de drenagem
 I - Interruptor de energia
 J - Entrada para cabo de força
 K - mangueira
 L - Cabo entrada de força
 M - Cesta




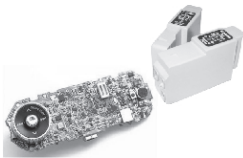


Atenção

O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas instruções de uso é de inteira responsabilidade do usuário.

APLICAÇÕES

Exemplos de aplicação

Detritos deixados em pequenos buracos e fendas são difíceis de limpar, onde bactérias e fungos podem se desenvolver. Utilizar a limpeza ultrassônica para limpar profundamente os itens antes da desinfecção.

Peças de precisão	Artigos que utilizam PCB	Itens pessoais
		
Rolamentos, engrenagens, válvulas, injetores de combustível, etc.	PCB de telefones celulares, MP4, cartuchos de tinta, etc.	Óculos e óculos de sol.
Instrumentos médicos/odontológicos		Artigos laboratoriais
		
Instrumentos cirúrgicos, alicates, brocas, peças de mão, etc.	Tubos de ensaio, provetas, frascos, etc.	

Itens não apropriados para a lavadora ultrassônica

Jóias leves: Pérolas, esmeraldas, marfim, coral, ágata, conchas de tartaruga, etc.

Esses objetos têm pouca solidez, assim arranhões podem ocorrer durante a limpeza.

Itens soldados, cromados e colado:

Metal de solda, metal galvanizado, conexões.

A lavadora ultrassônica pode aumentar os espaçamentos das juntas soldadas, revestimento chapeado ou itens colados e pode causar separação.

Outros: Vidros, cerâmicas, filtros com fissuras preexistentes.

A lavadora ultrassônica pode aumentar as fissuras preexistentes no revestimento dos vidros e cerâmicas. Se os itens não tiverem fissuras preexistentes, então não há problema.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características técnicas do equipamento e seus acessórios

Recursos

Tanque de limpeza

Capacidade do tanque 6000 ml

Dois Transdutores ultrassônicos industriais

Distribuição mais uniforme de ondas ultrassônicas, limpeza profunda e alta durabilidade

Visor LED com duas cores

Relógio com intervalo de 1 a 30 minutos, 5 ajustes de temperatura, indicadores de status de funcionamento

Dois aquecedores de cerâmica

Moderno, seguro, eficiente e durável

Circuitos de controle independentes para cada transdutor ultrassônico

Alta eficiência, não suscetível à interferência

Protetores múltiplos de circuito

Quando sobrecarregada ou indevidamente utilizada, os protetores interrompem a alimentação de energia protegendo o equipamento

Ventoinha de arrefecimento

Melhora a dissipação de calor e beneficia operações contínuas

Recurso de desgaseificação

Dissolve a solução rapidamente

Válvula de drenagem

Facilidade para o esvaziamento

Geral

Modelo

Lavadora Ultrassônica Bio Free 6L

Proteção contra choque elétrico

Equipamento de Classe I

Modo de operação

Não contínua ("ON") 45 minuto. ("OFF") 20 minutos.

Tensão de Alimentação

127 ou 220 V~

Freqüência

50/60 Hz

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº de fases

Monofásico / Bifásico

Potência

310W (220V) / 290W (127V)

Freqüência ultrassônica

35.000Hz

Capacidade do tanque

6000 ml

Dimensões do tanque

32,3 x 20,5 x 9,9 cm

Objeto mais extenso permitido no tanque

34 cm

Configuração do relógio digital

Relógio com intervalo 1-30 minutos

Material do tanque

Aço inoxidável

Configurações de temperatura

40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 60°C

Material do corpo (carcaça)

ABS

Peso líquido

5,4 kg

Peso bruto

6,8 kg

Dimensões da unidade

43,8 x 30 x 35 cm

Dimensões da embalagem

50,5 x 36,0 x 32,4 cm



Cuidado ao utilizar este equipamento em conjunto com outros equipamentos que possam se mover, para que se evite colisões.



Os materiais utilizados na construção do equipamento são Biocompatíveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Simbologias da embalagem



Empilhamento máximo, determina a quantidade máxima de caixa que pode ser empilhada durante o transporte e armazenamento “conforme embalagem”.



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de umidade (não expor à chuva, respingos d'água ou piso umedecido).




Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com o lado da seta para cima.



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de luz.



Determina que a embalagem deve ser armazenada e transportada com cuidado (não deve sofrer quedas e nem receber impactos).

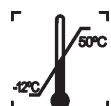

Determina os limites de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada.

Simbologias do produto



Cuidado: Indica instrução importante para operação do produto. Não segui-la, pode ocasionar mal-funcionamento perigoso.



Importante: Indica instrução de segurança para operação do produto. Não segui-la, pode resultar em sério perigo ao paciente.



Aterramento (em vários pontos do equipamento) indica a condição de estar aterrado.



Nota: Indica informação útil para operação do produto.



Botão On/Off.



Luz indicadora - Status de Trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Simbologias do produto



Referir-se ao manual de instruções.



Botão de funções - Funções (Desgaseificação/Normal).



Display digital.



Status de desgaseificação.



Status de limpeza normal.



Status do aquecedor.



Botão de configuração do tempo.



Botão de ajuste do tempo.



Botão de acionamento do aquecedor.




Botão de configuração da temperatura



Botão de configuração rápida do relógio.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Painel de controle e operações

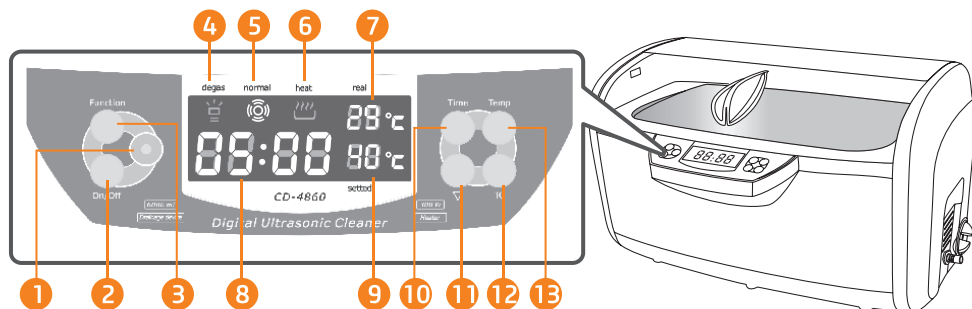

1. Luz indicadora - Status de Trabalho

Verde - Status de funcionamento normal, pronto para uso.

Vermelho - Sob a proteção de superaquecimento, são necessários 15 minutos de espera para que a luz mude de vermelho para verde. O funcionamento pode ser retomado posteriormente.

2. Tecla On/Off (Ligar/Desligar) - Interruptor de ligamento/desligamento da unidade

Depois de ligar, o visor LED, com horário padrão **05:00**, e a unidade estão prontos e com status de funcionamento normal.

Pressione botão On/Off uma vez para iniciar o funcionamento da lavadora. A limpeza é interrompida quando a contagem regressiva pára em **00:00**. Se o aparelho precisar ser interrompido antes que o tempo acabe, pressione botão On/Off.

3. Botão de funções - Funções (Desgaseificação/Normal)

Pressione o Botão de Funções (03), , ele acende, indicando que a função de desgaseificação foi selecionada. Pressione o botão On/Off para iniciar a função de desgaseificação . Acenderá por cerca de 2 minutos; em seguida, a unidade voltará à função de limpeza normal . Pressionar o botão On/Off antes do fim fará com que a desgaseificação seja interrompida. Se for necessária a desgaseificação adicional, pressione o Botão de Funções novamente (03), .

Desgaseificação


A água recentemente adicionada pode gerar muitas bolhas de ar nas paredes do tanque. Essa circunstância reduzirá o efeito da limpeza na fase de início da limpeza ultrassônica. Ligar a função de desgaseificação dissipará as gotas e as bolhas de ar melhorando a eficiência da limpeza (tempo aproximado, 2 minutos).

4. Status de desgaseificação



Illuminado , a função de desgaseificação está selecionada. — Piscando, a desgaseificação está em andamento.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

5. Status de limpeza normal

 - Iluminado, a limpeza normal está em andamento.

6. Status do aquecedor

Pressione o botão TC, ele pisca , indicando que o aquecedor está ligado. Pressione o botão TC novamente, ele apaga , indicando que o aquecedor está desligado.

7. Visor de temperatura da água

Exibe a temperatura real da água no tanque.

8. 05:00 Visor de tempo de funcionamento

Ele faz a contagem regressiva, depois do trabalho ser iniciado.

9. Visor de temperatura da água (configuração)

Pressione o botão "Temp" para selecionar uma das 5 configurações de temperatura.

10. Botão TIME "tempo" (configuração) - Botão de configuração rápida do relógio



Pressione o botão TIME, o LED mostra 05:00. Aperte o botão novamente para configurar o relógio.

Cada vez pressionado, o botão acrescenta 5 minutos.

11. Botão ▽ - Botão de diminuição do relógio.

Cada vez pressionado, reduz o relógio em 1 minuto.

12. Botão TC - Botão do aquecedor.

Pressione o botão TC, quando pisca , indica que o aquecedor está ligado. Para cancelar o aquecimento, pressione TC novamente, ele se apaga, , indicando que o aquecedor está desligado.

13. Botão TEMP - Botão de ajuste de temperatura.

5 configurações de temperaturas podem ser selecionadas. A temperatura padrão é de 40°C. Pressione o botão "TEMP" para selecionar a temperatura na seguinte sequência:




Nota

Quando a temperatura da água atinge 60°C o aparelho desliga-se automaticamente.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Métodos de limpeza

1 Limpeza regular

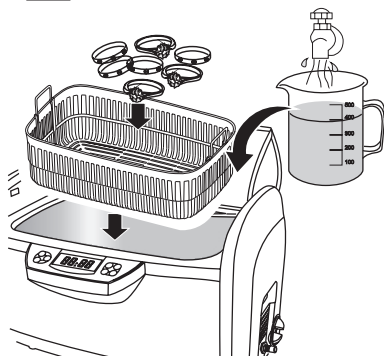

Locais apropriados: Óticas, laboratórios químicos e clínicas odontológicas.

Método de limpeza:

1. Adicione a água ao tanque de limpeza até um nível entre as linhas "MIN" e "MAX" e acima do objeto.
2. Coloque os objetos a serem limpos no interior da cesta e coloque a cesta dentro do tanque.
3. Ligue o interruptor principal. Pressione o botão TIME para configurar o relógio entre 5 e 10 minutos. Pressione o botão On/Off uma vez para iniciar a limpeza.

Observações sobre a utilização da cesta:

1. A cesta reduz o atrito entre os objetos e o tanque, mas absorve cerca de 30% da energia ultrassônica reduzindo o efeito de limpeza.
2. Uma cesta de metal absorve menos energia ultrassônica (cerca de 8%).

Use água de torneira, soluções químicas são dispensáveis na maioria dos casos.




Notas

Informamos que as Lavadoras Ultrassônicas Bio FREE "D700" apresentam ótimos resultados quando utilizado somente água no processo de limpeza, porém, utilizar detergentes enzimáticos no processo não há contra indicação.

Este modelo é equipado com um grande tanque. Ao limpar objetos pequenos, o método de "limpeza indireta" pode ser usado com resultado satisfatório. Lavadoras ultrassônicas menores também podem fazer o trabalho.

2 Limpeza indireta

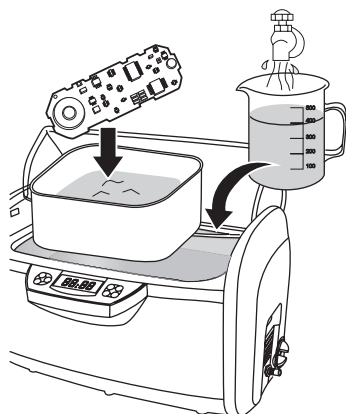

Coloque os objetos em um recipiente separado. Utilize ondas ultrassônicas para penetrar o recipiente e realizar a limpeza. Locais apropriados: Lojas de impressão, clínicas odontológicas, assistência técnica de telefones móveis e eletrônicos.

Diferentes indústrias utilizam diferentes fluidos a serem utilizados no interior dos recipientes:

1. Esterilização de instrumentos médicos - Solução Especial (limpeza antes da esterilização).
2. Peças de precisão - Hexano (para dissolver gordura, para evaporar rapidamente).
3. Assistenções técnicas para telefones celulares e eletrônicos - Álcool puro (para evaporar rapidamente).
4. Lojas de impressão - Acetona é frequentemente utilizada (para dissolver a tinta).

Não permita que a acetona entre em contato com as partes de plástico do equipamento para evitar corrosão. Utilize a limpeza indireta e um recipiente de vidro ou metal para a acetona.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO


Método de limpeza:

1. Coloque o objeto dentro de um recipiente. Adicione o fluido apropriado para submergir o objeto.
2. Colocar o recipiente diretamente no tanque. Adicione a água até um nível entre MIN e MAX, sem cobrir o recipiente.
3. Pressione o botão TIME para definir 10 minutos para o relógio. Pressione o botão On/Off uma vez para iniciar a limpeza. As ondas ultrassônicas penetrarão o recipiente e limparão o objeto.

Escolha do recipiente:

1. Embalagens de plástico - plásticos são macios; absorverão cerca de 30% da energia ultrassônica e reduzirão o efeito da limpeza.
2. Recipientes de alumínio - Absorvem cerca de 20% da energia ultrassônica.
3. Recipientes de aço inoxidável - Absorvem cerca de 8% da energia ultrassônica.

3 Limpeza avançada

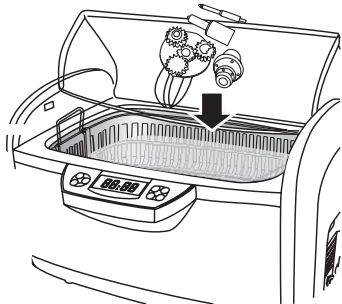

Detritos acumulados durante um longo período de tempo, objetos gordurosos ou muito sujos.

Locais apropriados: Estabelecimentos de reparo automotivo e fabricantes de hardware.

Método de limpeza:

1. Os objetos grandes podem ser colocados diretamente no tanque. Objetos pequenos podem ser colocados na cesta e, em seguida, no tanque. Não coloque os objetos uns sobre os outros, para evitar atrito durante a limpeza.
2. Adicione água até um nível entre MIN e MAX e acima dos objetos.
3. Ligue o interruptor principal. Pressione o botão TEMP para definir a temperatura da água em 45°C.


Pressione TC para ligar o aquecedor, ele piscará. Feche a tampa. O visor LED exibe a temperatura real da água. Quando a água atingir a temperatura programada, ele apagará indicando que o aparelho está desligado.

4. Pressione o botão TIME para definir 10 minutos para o relógio. Pressione o botão On/Off uma vez para iniciar a limpeza. A gordura será dissipada e aparentará ser algo como uma fumaça preta na água.

5. Quando parar, abra a válvula de drenagem para liberar a água suja. Feche a válvula depois.
6. Limpe o tanque e substitua a água. Lave os objetos por mais 3 minutos para remover os detritos residuais.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

4 Limpeza especial

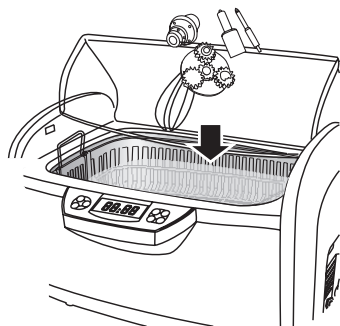



Objetos de prata, cobre ou latão escurecidos pela oxidação precisam de limpeza especial.

Locais apropriados: Fabricantes de produtos de cobre, prata ou bronze.


Método de limpeza:

1. Coloque os objetos na cesta e, em seguida, no tanque; adicione água até um nível entre MIN e MAX e acima dos objetos.

2. Ligue o interruptor principal. Pressione o botão TEMP para definir a temperatura da água em 50°C. Pressione TC para ligar o aquecedor,  ele piscará. Feche a tampa. O visor LED exibe a temperatura real da água. Quando a água atingir a temperatura programada, apagará  indicando que o aparelho está desligado.

O aquecedor possui dupla proteção. Será desligado automaticamente após 50 minutos.

3. Pressione o botão TIME para programar 15 minutos para o relógio.

4. Pressione o botão de funções para selecionar a função de desgaseificação. O botão se ilumina . Pressione o botão On/Off para iniciar a desgaseificação. Após 2 minutos o dispositivo alternará o modo para limpeza normal automaticamente.

5. Quando a limpeza estiver concluída, retire a cesta e os objetos. Se houver muitos objetos e alguns detritos permanecerem, adicione 5 minutos e repita a limpeza.

6. Siga as etapas 5 e 6 na seção de limpeza avançada para drenar a água suja, adicione água limpa, lave os objetos por mais 3 minutos para remover os produtos químicos residuais.




Notas

Durante a limpeza, os detritos saem dos objetos como "fumaça". A água se torna turva. Este método removerá a oxidação e fará com que os objetos pareçam novos.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Diretrizes de operação

1

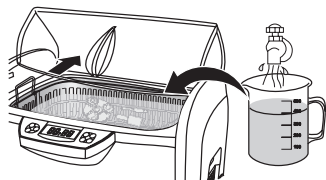


Abra a tampa, como ilustrado, coloque os objetos na cesta e, em seguida, coloque-os no tanque de limpeza. Adicione a água até um nível entre as linhas "MIN" e "MAX" e acima dos objetos.



Se o aparelho for ligado sem água, a energia ultrassônica não será absorvida. Depois de mais de 15 segundos, esse procedimento pode danificar o aparelho ou reduzir drasticamente sua vida útil.

2

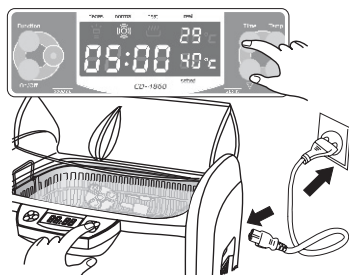

Conecte o cabo de alimentação a uma saída de energia e ligue o interruptor. O visor LED mostra **05:00**. Esta é a configuração mais comum do relógio e de status de funcionamento.

Se o relógio necessitar ser ajustado, pressione o botão TIME e o botão **∇**. (conforme necessidade)


O relógio pode ser definido entre 1 e 30 minutos.

Os períodos de limpeza comuns são 5, 10 e 15 minutos.

O prolongamento do período de limpeza pode resultar em:

- Afrouxamento dos parafusos (se utilizados).
- Aumento das fissuras preexistentes.
- Descascamento do revestimento do objeto.

3

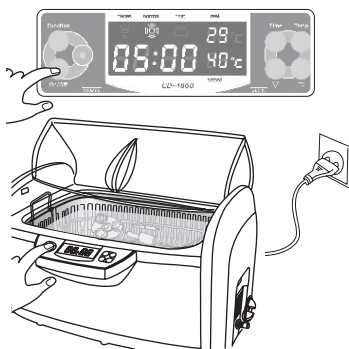

Pressione o botão On/Off uma vez para iniciar a limpeza.

Durante a limpeza, os 2 LEDs azuis da unidade se acendem, um zumbido pode ser ouvido vindo do tanque de limpeza, indicando que a limpeza está em andamento.

Fechar a tampa reduzirá o nível de ruído.

O visor LED entrará em contagem regressiva, mostrando o tempo de limpeza restante. Quando o visor exibir 00:00, a limpeza estará concluída. Para interromper a limpeza a qualquer momento, pressione o botão On/Off.




Nota

A unidade é projetada com proteção contra superaquecimento, para evitar o funcionamento prolongado e contínuo por muito tempo. Quando a luz vermelha estiver acesa, o aparelho não poderá ser ligado, mesmo que seja forçado a isso. A unidade permanecerá inativa por cerca de 20 minutos e poderá ser reiniciada após a luz verde se acender.



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

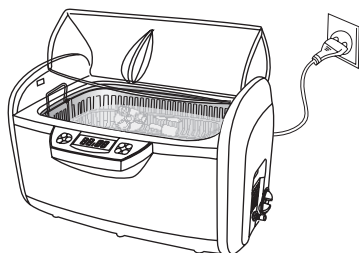4




Selecione um dos quatro métodos de limpeza recomendado anteriormente.

a. Quando o aquecedor for necessário, pressione o botão TEMP para selecionar uma das cinco configurações predefinidas de temperatura.

Pressione o botão TC, ele piscará , indicando que o aquecedor está ligado. O visor LED exibe a temperatura real da água. Quando a água atingir a temperatura programada, apagará , indicando que o aquecedor está desligado.


Para garantir a segurança, a unidade é projetada com proteção dupla.

O aquecedor será desligado automaticamente se estiver sendo executado por 50 minutos.

b. A função de desgaseificação pode ser utilizada. Pressione o botão TIME para ajustar 10 minutos no relógio e, em seguida, pressione o botão de funções, ele acenderá . Pressione o botão On/Off para iniciar a desgaseificação. O dispositivo alterna o modo de limpeza para normal após 2 minutos.

c. Quando a “fumaça” dos resíduos não for mais visível, a limpeza estará concluída. Se uma limpeza adicional for necessária, configure novamente o relógio e repita os passos acima.

5

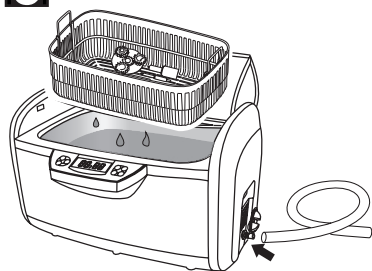


Quando a limpeza estiver concluída, desconecte o cabo de alimentação, abra a tampa e retire a cesta e os objetos.


Conecte a mangueira ao tubo de drenagem, como mostrado anteriormente.

- Abra a válvula de drenagem para escoar a água suja.
- Limpe e seque o tanque.
- Feche a válvula de drenagem.


PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

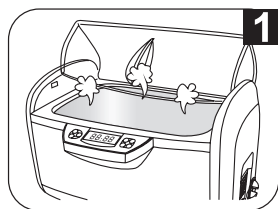

Não ligue o aparelho sem que haja água no tanque. Mesmo que a unidade tenha sido projetada com múltiplas proteções, se ela estiver ligada há mais de 15 segundos sem água no tanque, isso poderá danificá-la ou reduzir drasticamente a sua vida útil.

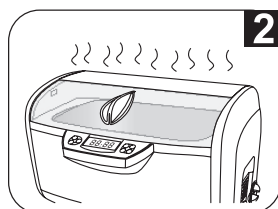


Não deixe a unidade em funcionamento por tempo prolongado ou de forma contínua. A unidade foi projetada com proteção contra superaquecimento. Se a unidade tiver sido executada por 45 minutos, recomenda-se a sua interrupção por aproximadamente 20 minutos.

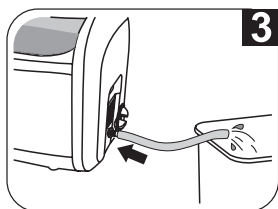

Não mantenha água no tanque de limpeza por tempo prolongado. Após a limpeza ter sido concluída, abra a válvula de drenagem para escoar a água suja. Limpe e seque o tanque.



Não borrife água sobre o equipamento. Use uma toalha para secar o tanque e o corpo do equipamento.

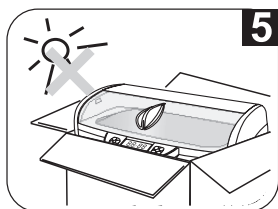

Não exponha o aparelho à luminosidade solar direta por um longo período. Mantenha o aparelho em local seco, fresco e ventilado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Recomendações para a conservação do equipamento

Seu equipamento "D700" foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da moderna tecnologia. Todos aparelhos necessitam de cuidados especiais, que muitas vezes são esquecidos por diversos motivos e circunstâncias, aqui estão alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

Condições de transporte, armazenamento e operação

O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:

- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos.
- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d'água ou piso umedecido.
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original.
- Ao transportar, não movê-lo em superfícies irregulares e proteja a embalagem da chuva direta e respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.

Condições ambientais de transporte ou armazenamento:

- Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento -29°C a +60°C.
- Faixa de umidade relativa de transporte ou armazenamento 20% a 90%.
- Faixa de pressão atmosférica 500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg).

Condições ambientais de operação:

- Faixa de temperatura ambiente de funcionamento +10°C a +40°C.
- Faixa de temperatura ambiente recomendada +21°C a +26°C.
- Faixa de umidade relativa de funcionamento 30% a 75%.
- Faixa de pressão atmosférica 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg).
- Altitude de operação: ≤2000m.

Atenção

O Equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) conforme mencionados nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

Sensibilidade a condições ambientais previsíveis em situações normais de uso

- O equipamento foi projetado para não ser sensível a interferências como campos magnéticos, influências elétricas externas, descargas eletrostáticas, pressão ou variação de pressão, desde que o equipamento seja instalado, mantido, limpo, conservado, transportado e operado conforme esta instrução de uso.

Precauções e advertências "durante a instalação" do equipamento

- Certifique-se se a voltagem do equipamento encontra-se de acordo com a rede local (127 ou 220V).
- Posicione a unidade em um lugar onde não será molhada.
- Instale a unidade em um local onde não será danificada pela pressão, temperatura, umidade, luz solar direta, pó ou sais.
- O equipamento não deverá ser submetido à inclinação, vibrações excessivas, ou choques (incluindo durante transporte e manipulação).
- Este equipamento não foi projetado para uso em ambiente onde vapores, misturas anestésicas inflamáveis com o ar, ou oxigênio e óxido nitroso possam ser detectados.
- Antes da primeira utilização e/ou após longas interrupções de trabalho como férias, limpe e desinfete o equipamento.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS



Aterramento:

O aterramento é obrigatório, somente desta maneira o usuário estará em completa segurança. Cabe somente ao usuário a responsabilidade pelo não aterramento, implicando a perda da garantia.

Utilizar tomada de três pinos. Nunca ligar o aterramento no neutro.

Precauções e advertências “durante a utilização” do equipamento

- O equipamento deverá ser operado somente por técnicos devidamente habilitados e treinados (Cirurgiões Dentistas, Profissionais Capacitados)
- Na necessidade de uma eventual manutenção, utilize somente serviços da Assistência Técnica Autorizada D700 .
- O equipamento foi fabricado para suportar operação contínua e intermitente; portanto siga os ciclos descritos nestas Instruções de Uso.
- Embora este equipamento tenha sido projetado de acordo com as normas de compatibilidade eletromagnética, pode, em condições muito extremas, causar interferência com outros equipamentos. Não utilize este equipamento em conjunto com outros dispositivos muito sensíveis a interferência ou com dispositivos que criem altos distúrbios eletromagnéticos.
- Não submeter as partes plásticas ao contato com substâncias químicas, utilizadas nas rotinas do tratamento odontológico. Tais como: ácidos, mercúrio, líquidos acrílicos, amálgamas, etc.
- Nunca bloqueie as aberturas de ventilação do aparelho. Mantenha as aberturas livres de fiapos, pêlos e outros materiais.
- Não utilize o produto sem encher o tanque com água. O funcionamento a seco pode danificar o aparelho.
- Não encha o tanque acima da linha máxima para evitar transbordamento.

A D700 não será responsável por:

- Uso do equipamento diferente daquele para o qual se destina.
- Danos causados ao equipamento, ao profissional e/ou ao paciente pela instalação incorreta e procedimentos errôneos de manutenção, diferentes daqueles descritos nestas instruções de uso que acompanham o equipamento ou pela operação incorreta do mesmo.

Precauções e advertências “após” a utilização do equipamento

- Desligue a chave geral do equipamento quando não estiver em uso por tempo prolongado.
- Mantenha o equipamento sempre limpo para a próxima operação.
- Não modifique nenhuma parte do equipamento. Não desconecte o cabo ou outras conexões sem necessidade.

Precauções e advertências durante a “limpeza e desinfecção” do equipamento

- Antes de limpar o equipamento, desligue a chave geral.
- Evite derramar água ou outros líquidos dentro do equipamento, o que poderia causar curtos-circuitos.
- Não utilizar material microabrasivo ou palha de aço na limpeza, não empregar solventes orgânicos ou detergentes que contenham solventes tais como éter, tira manchas, etc.
- Utilizar detergentes enzimáticos no processo não há contra indicação.
- Ao limpar objetos de prata ou cobre, onde a oxidação gerou um efeito de escurecimento, é necessário adicionar soluções especiais à água para remover a oxidação.

Precauções em caso de alteração no funcionamento do equipamento

- Se o equipamento apresentar alguma anormalidade verifique se o problema está relacionado a algum item listado no tópico imprevistos (falhas, causas e soluções). Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, retire o cabo de alimentação de energia da tomada e entre

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

em contato com seu representante (D700).

Precauções a serem adotadas contra riscos previsíveis ou incomuns, relacionados com a desativação e abandono do equipamento

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido do Equipamento e seus acessórios /partes após a inutilização, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme legislação local do país).
- Atentar-se a legislação local do país para as condições de instalação e descarte dos resíduos.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Procedimentos adicionais para reutilização

O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, ou seja, ilimitadas, necessitando apenas de limpeza e desinfecção.

Limpeza e desinfecção

Importante: Para efetuar a limpeza ou qualquer tipo de manutenção certifique-se de que o equipamento esteja desligado da rede elétrica.



Atenção

O procedimento de limpeza abaixo deve ser feito ao iniciar o expediente e após cada paciente. Sempre desligue o interruptor principal antes de efetuar os procedimentos de manutenção diária.

Após a troca de líquidos da cuba de inox; retire os resíduos de sujeira depositados no fundo utilizando um pano macio ou esponja. Secar e limpar com um pano umedecido em álcool 70°.

Para a limpeza externa, incluindo a tampa, utilizar um pano umedecido em água e sabão neutro ou o produto recomendado abaixo:

“BactSpray” (nº Reg. MS: 3.2079.0041.001-5) ou outro que possua características similares: Ingrediente Ativo: Cloreto de Benzalcônio (Tri-quaternário de Amônio) Sol à 50%.....0,329%

Composição do produto: Butilglicol, Decil Poliglicose, Benzoato de Sódio, Nitrito de Sódio, Essência, Propano / Butano Desodorizado, Água desmineralizada.

Maiores informações sobre procedimentos de limpeza, consulte as instruções do fabricante no produto.



Atenção

- Visando eliminar riscos de segurança ou danos ao equipamento, recomendamos que ao efetuar a limpeza não haja penetração de líquidos no interior do mesmo.

- A aplicação de outros produtos químicos para limpeza a base de solventes ou hipoclorito de sódio não são recomendados, pois podem danificar o equipamento.



Nota

O registro no Ministério da Saúde do “BactSpray” é realizado separadamente do produto descrito neste manual, pois o “BactSpray” não é fabricado pela D700.



De modo a prevenir contaminação, utilize luvas e outros sistemas de proteção durante a desinfecção.

Mesmo que, durante os procedimentos, as luvas sejam utilizadas, após a retirada das luvas as mãos devem ser lavadas.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Manutenção Preventiva

O equipamento deverá sofrer aferições rotineiras, conforme legislação vigente do país. Mais nunca com período superior a 3 anos.

Para a proteção do seu equipamento, procure uma assistência técnica D700 para revisões periódicas de manutenção preventiva.

Manutenção Corretiva


A D700 declara que o fornecimento de diagramas de circuitos, listas de componentes ou quaisquer outras informações que propiciem assistência técnica por parte do usuário, poderão ser solicitadas, desde que previamente acordado, entre este e a Empresa.



Atenção

Caso o equipamento apresente qualquer anormalidade, verifique se o problema está relacionado com algum dos itens listados no item Imprevisto (situação, causa e solução). Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento e solicite a presença de um técnico representante D700 na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento D700: + 55 (16) 3512-1212.

IMPREVISTOS - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 No caso de encontrar algum problema na operação, siga as instruções abaixo para verificar e consertar o problema, e/ou entre em contato com seu representante.

Imprevistos	Provável Causa	Soluções
- Inoperante completamente.	- Plug desconectado da rede. - Fusível do equipamento queimado. - Falta de energia na rede.	- Conectar o plug. - Desligue a alimentação do equipamento e solicite a presença de um Técnico credenciado. - Aguardar normalização da rede.
- Cavitação baixa ou nula.	- Equipamento ligado na voltagem inadequada. - Queima do gerador ultrasônico. - Instalação na voltagem incorreta ou funcionamento sem água na cuba de inox.	- Ligar a lavadora na voltagem correta da rede. Caso o equipamento for 110V e foi ligado na rede 220V, o mesmo sofreu queima, entrar em contato com Assistência Credenciada. - Entrar em contato com Assistência Credenciada.
- Sistema de aquecimento da água não funciona.	- Resistência queimada.	- Entrar em contato com Assistência Credenciada.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO

Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia e normas contidas no Certificado de Garantia que acompanha o produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz respeito à reposição de peças.

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais D700. Elas têm a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante D700.

Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu aparelho.

Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante D700 na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento D700: + 55 (16) 3512-1212.

D700

Tel.: 55 16 3512-1212
www.d700.com.br

uma marca
alliage