

·eagle.



newID|Λ

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

PARTES E ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES



Sensor radiográfico intraoral

O sensor permite a captura da imagem radiografia digital intraoral.



Pendrive de instalação

Pendrive contendo o software de manipulação de imagem, drives e manuais.



Atenção

O instalador contido no pendrive de instalação possui todos os arquivos de calibração do sensor, assim não pode ser utilizado com outro sensor.



Case

1. INSTALAÇÃO

1.1. Requisitos do computador

O sistema de computador deve satisfazer os seguintes requisitos.

| | |
|---------------------|--|
| Sistema Operacional | Windows 7 (x86 e x64) – Home, Starter, Pro Windows 8 (x86 e x64) – Pro Windows 8.1 (x86 e x64) – Pro Windows 10 (x86 e x64) – Home, Pro |
| CPU | Intel i5 3.0 Ghz ou superior |
| HDD | 500 GB |
| RAM | 2GB DDR2 SDRAM |
| Monitor | 1024x768 |
| Conector USB | 2 x USB 2.0 – 500mA |

1.2. Requisitos elétricos

O sensor New IDA não requer fonte de alimentação externa, pois sua alimentação é feita através da conexão USB do computador e possui um consumo aproximado de 300mA.



Atenção

IMPORTANTE


Não use portas USB disponíveis em teclados ou do lado dianteiro e/ou lateral do computador. Esses conectores frequentemente são incapazes de fornecer alimentação suficiente para o funcionamento adequado do sensor.

1.3. Instalação do software


Conecte o Pendrive que acompanha o New IDA na porta USB, abra o dispositivo e clique no arquivo Setup.exe




Selecione o idioma

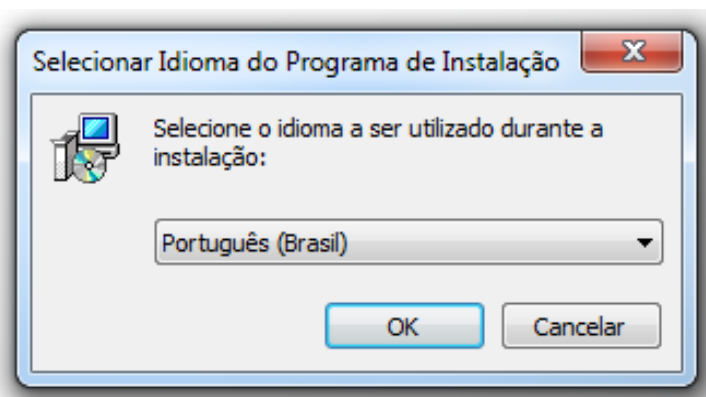


Clique em Avançar

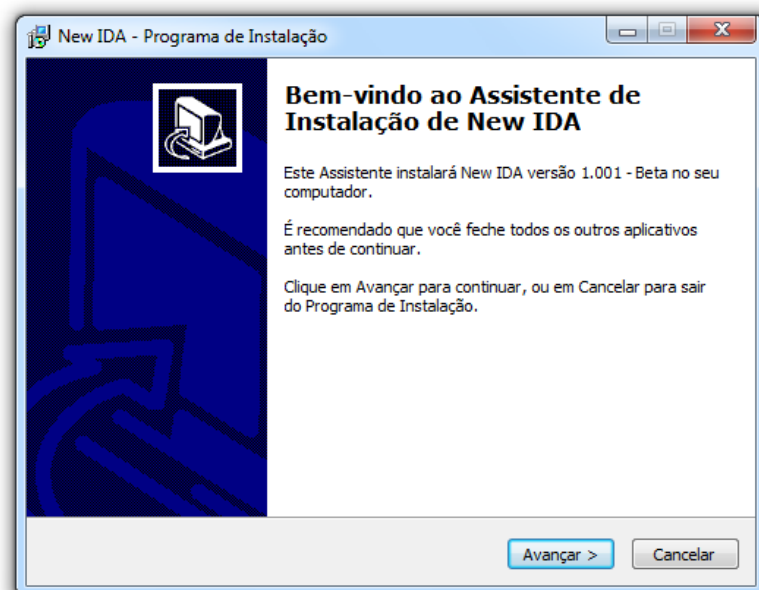


Leia e compreenda o contrato de Licença ao Usuário Final e caso aceite, clique em Eu aceito os termos do Contrato. Clique em Avançar.

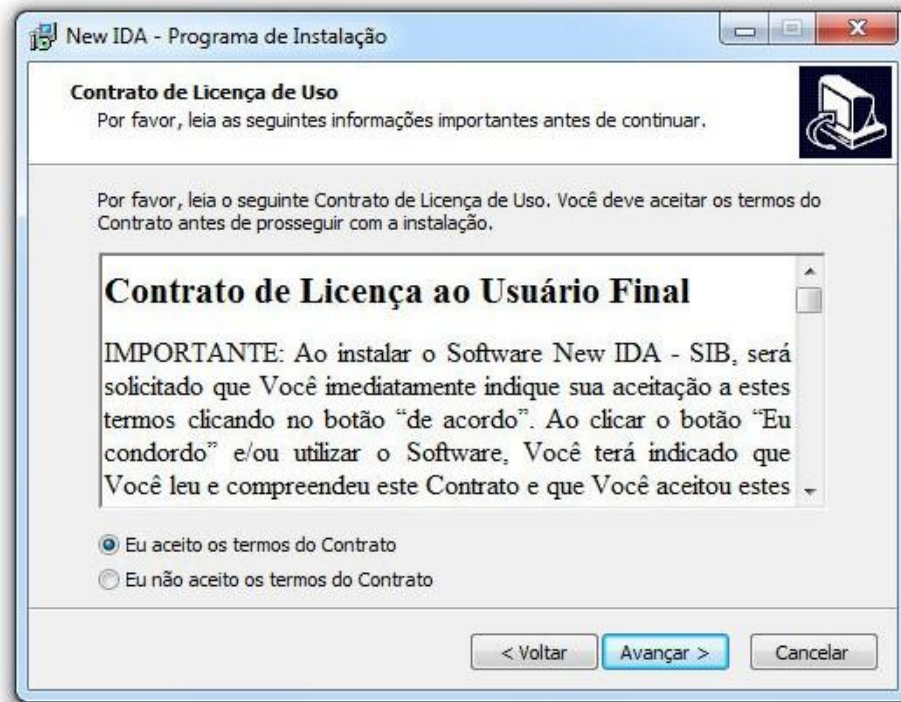


Selecione a caixa de dialogo se deseja criar um ícone na Área de Trabalho e clique em Avançar

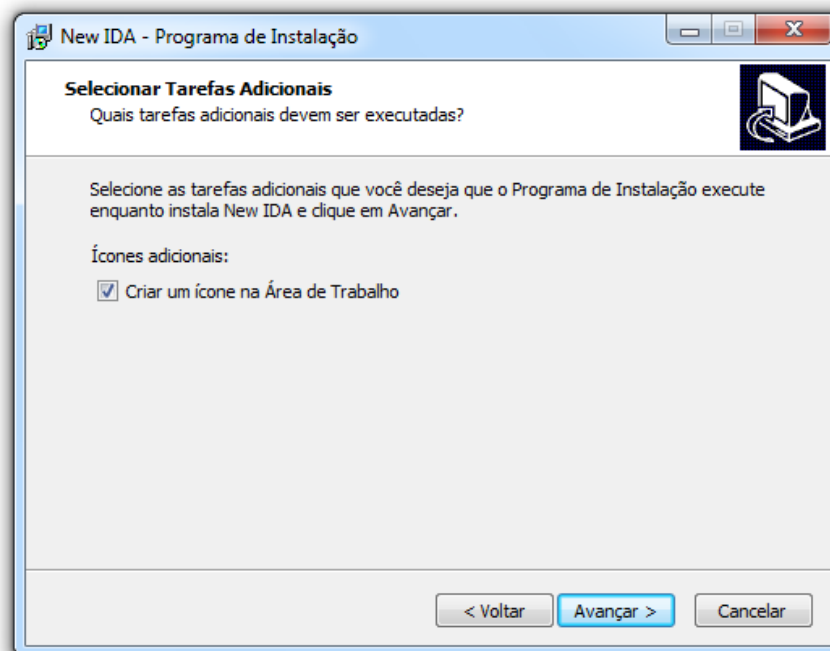


Clique em Instalar, aguarde a instalação e clique em Concluir

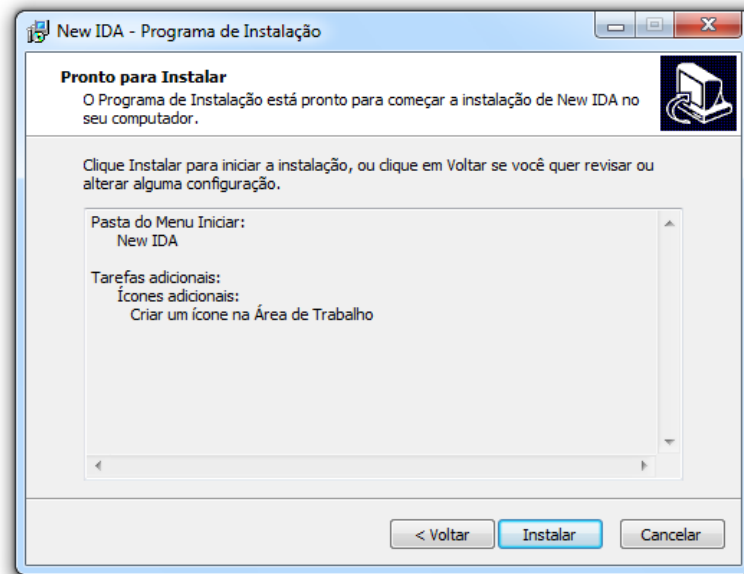


Setup irá instalar .NET 4.5.1

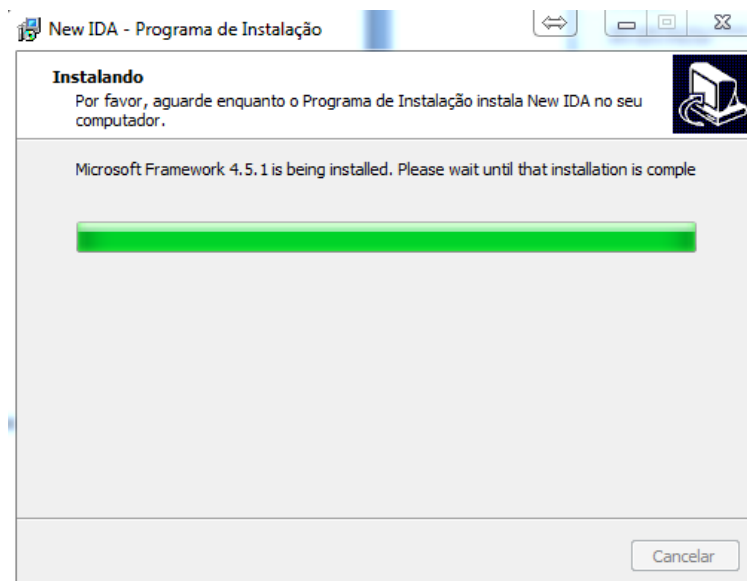


Clique em “I agree”

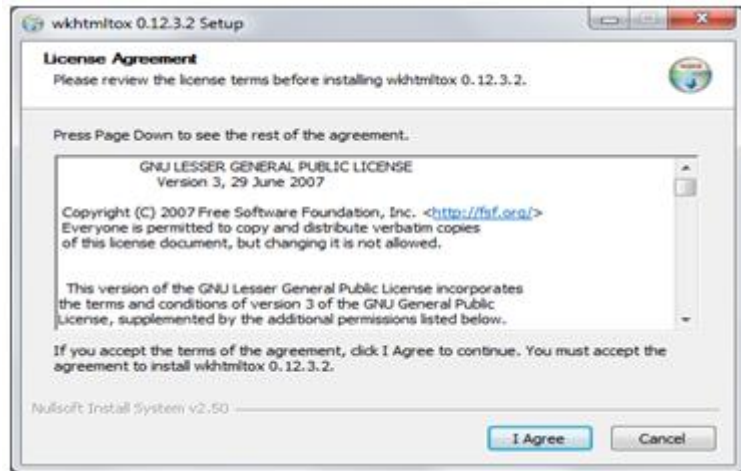


Clique em “Instal”

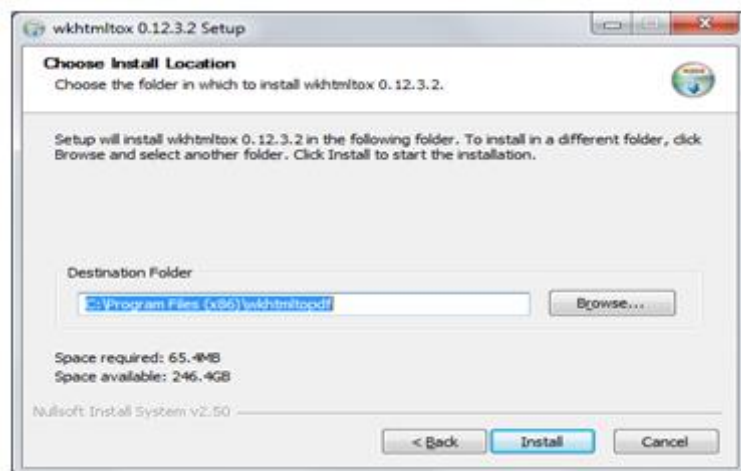

Aguarde o fim da instalação e clique em “Close”

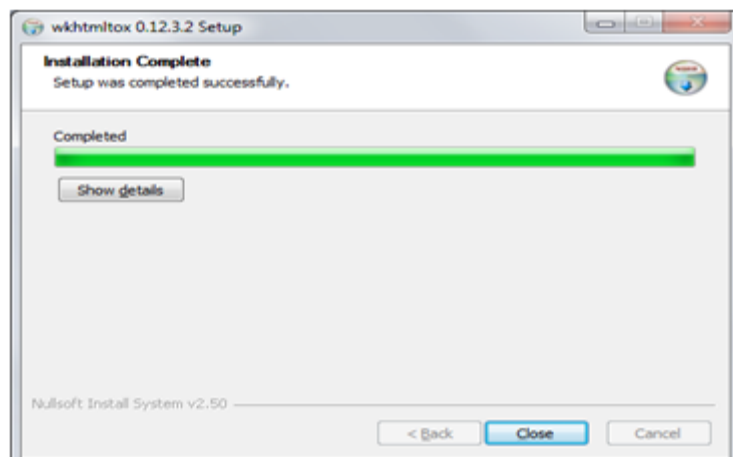

Setup irá instalar o driver USB. Pressione Install para iniciar o processo de instalação.

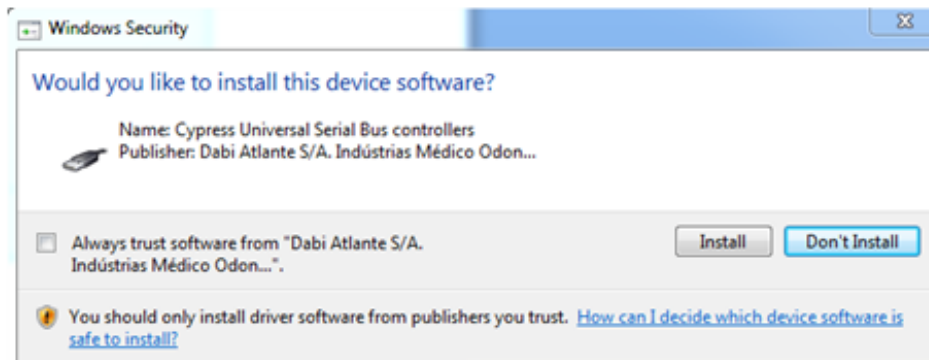

Clique em Concluir para finalizar a instalação.

